

# ВИЗУАЛЬНЫЙ ПЛЕЕР МЕЛЛОН КОМФОРТ

## Паспорт

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Настоящий паспорт распространяется на визуальный плеер «Комфорт» под товарным знаком «МЕЛЛОН» исполнений ВГ-101, ВГ-201 по ТУ 27.90.40-003-99660227-2019 (далее по тексту – плеер).

Изготовитель: ООО «МедТехПроКор» (Адрес: 115682, РФ, г. Москва, Ореховый б-р, д.59, к.2, пом. III; Телефон: +7-495-2042707 )

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.МЕ67.В.00004/20 от 31.01.2020

Основные технические данные

Электропитание.....от USB (5В) или через адаптер от сети 220 В/50Гц  
Потребляемая мощность, не более.....2,5 Вт  
Масса плеера, не более .....0,25 кг  
Габаритные размеры, мм.....190x105x75  
Время непрерывной работы.....8 ч

Дополнительные технические данные

Способ синтеза цвета при цветовоспроизведении	Аддитивный RGB
Максимальная яркость воспроизводимого излучения	не более 250 кд/м <sup>2</sup>
Количество программ	46
Материал обтюратора ВГ-101/ВГ-201	ТПЭ/силикон

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- плеер – 1 шт.
- адаптер 220/USB – 1 шт.
- шнур питания USB-DC – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- чехол текстильный - 1 шт.

### 3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

#### 3.1 Сроки службы и хранения

3.1.1 Средний срок службы плеера до списания - 5 лет.

3.1.2 Срок хранения – два года. По истечению срока хранения плеер должен пройти стандартную процедуру проверки.

#### 3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие плеера требованиям ТУ 27.90.40-003-99660227-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

3.2.2 Гарантийный срок хранения – 2 года от даты изготовления или перепроверки плеера.

3.2.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения плеера потребителем.

3.2.4 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет неисправный плеер.

3.2.5 Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на плееры со следами механических и химических повреждений, нарушающих их конструктивную целостность.

3.2.6 Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи плеера. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты изготовления или пере проверки плеера.

3.3 Техническое обслуживание и ремонт

3.3.1 Техническое обслуживание плеера в течение срока службы не требуется.

3.3.2 Все виды ремонта плеера должны проводиться только в специализированных мастерских или на предприятии-изготовителе.

#### 4. КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация не требуется.

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ПРИЕМКЕ

Визуальный плеер  ВП – 101 /  ВП – 201 изготовлен, принят и упакован ООО «МедТехПроКор» в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Зав. № \_\_\_\_\_

штамп ОТК

\_\_\_\_\_ Дата

#### 6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Перед применением плеера необходимо удалить пыль с поверхностей мягкой сухой салфеткой из фланели.

6.2 Провести внешний осмотр плеера, убедиться в отсутствии механических повреждений и после этого приступить к работе с плеером.

6.3 По мере загрязнения плеера или при использовании его разными людьми необходимо дезинфицировать поверхности 4% раствором перекиси водорода, или 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% синтетического моющего средства (порошка), или 3% раствором технического хлорамина Б – 2-х кратным протиранием салфеткой из бязи с интервалом между протираниями 15 минут.

Во избежание попадания влаги внутрь плеера (плеер не является водозащищенным!) салфетка, смоченная дезинфицирующим раствором, должна быть отжата.

6.4 При работе с плеером необходимо соблюдать осторожность, оберегая его от ударов и падений во избежание повреждений светодиодных излучателей.

6.5 После транспортирования плеера в условиях отрицательных температур перед включением он должен быть выдержан без тары в помещении с температурой окружающего воздуха ( $20 \pm 5$ ) °С в течение не менее 2 часов.

6.6 Эксплуатация плеера допускается в помещении при температуре от +10 °С до +35 °С, при относительной влажности до 80 %.

6.7 Хранить плеер в защищенном от пыли и влаги месте при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности воздуха от 60 до 80 %.

#### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация плеера должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 и другими действующими нормами охраны окружающей среды для электронного оборудования